


ガッタカッター

ユーザーガイド

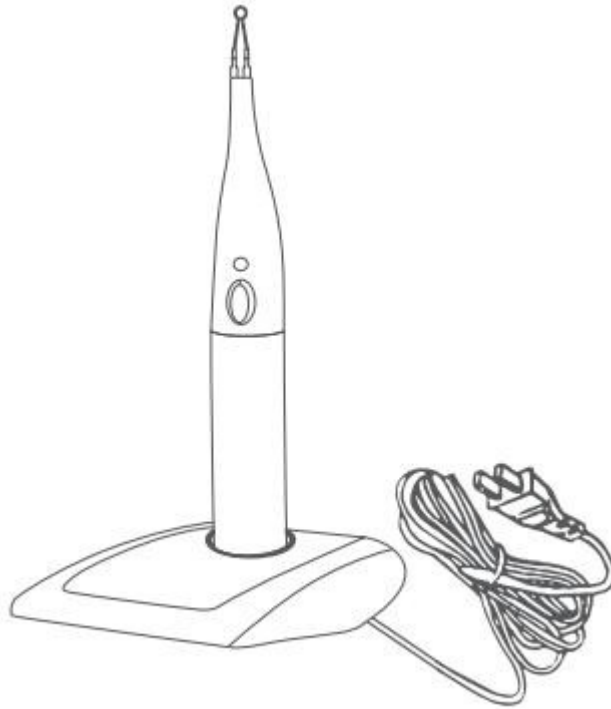

安全上の注意：



警告：本機器をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みください。これにより、適切な操作方法をご理解いただけます。

1. 本機器は取扱説明書の指示に従って使用してください。指示や要件の範囲を超える操作や用途については、製造元は一切の責任を負いません。
2. 電源を使用する際は、電圧が本機器の仕様範囲内であることを必ず確認してください。そうでない場合、操作者や患者に危害を及ぼす恐れがあります。
3. 怪我のリスクを避けるため、本機の先端が患者の唇、歯茎、または粘膜に触れないようにしてください。ラバーダムの使用が必須です！
4. 火災の危険：ペン先を可燃性の空気や液体に触れさせないでください。
5. 本機器は、可燃性ガスが充満している環境での使用は禁止されています。
6. 本機を液体に浸したり、液体中で充電したりしないでください。
7. 液体（おそらくバッテリーからのもの）が漏れている場合は、作業を中止し、認定アフターサービスセンターに機器を送ってバッテリーを交換してください。バッテリーから液体が漏れている状態で本機器を使用することは危険です。
8. バッテリーは交換しないでください。交換すると、問題や誤動作の原因となる可能性があります。
9. 心臓疾患のある方、妊婦、およびお子様は、本機器の使用に十分ご注意ください。
10. 本機器は専門家のみが使用できるものです。

標準構成：

ガッタカッターのハンドル	1
充電器ベース	1
ペン先（4個）	1

使用目的：

本製品は、根管充填処置を行うための、十分な訓練を受けた歯科医師および歯科技工所のみが使用できるものであり、根管から余分なガッタパーチャを切除するために使用されます。

取扱説明書：

充電を行う前に、電源の電圧が本機器に対応しているかご確認ください。充電：

1. まず、充電器を電源に接続してください
2. 本体を充電台にセットしてください。本体が充電スロットに収まると、ハンドル部分のインジケータランプが点灯します。

バッテリーについて：

1. 本製品を初めてご使用になる際は、完全に充電されていることを確認してください。充電には約12時間かかります。
2. ニッケル水素ハイブリッドバッテリーは、完全に放電する前に充電してください。これにより、本機の寿命を最大限に延ばすことができます。使用頻度にもよりますが、製品の寿命は約2年です。

作業中の操作：

1. 本体のペン先について、上部の湾曲した部分はボタンと反対側に位置しており、これにより作業が容易になります。
2. ペン先は冷却状態のときにハンドルに取り付けてください（取り付け中はボタンを操作しないでください）。ペン先の湾曲部分を使ってガッタパーチャを切断してください。
3. 操作を行う前に、ペンチップがしっかりと装着されていることを確認してください。洗浄：チップは数秒間加熱するだけで簡単に洗浄できます。
4. ガッタパーチャの切断が完了したら、ボタンを離し、先端が冷めるのを待ってから患者から取り外してください。操作ボタンは「接触式ボタン」です。ボタンを離すと、ユニットの動作は停止します。

安全上の注意事項：

1. ペンチップが本体に取り付けられた状態では、曲げないでください。
2. 治療中に過度な力を加えると、ペン先の寿命を縮める原因となります。
3. 電磁波の影響を避けてください。
4. いかなる方法でも本機を改造しないでください。

定期的なメンテナンスと清掃：

1. ペン先が正常に動作しない場合は、直ちにボタンを押して、ペン先の先端部分を確認してください。不具合がある場合は、新しいペン先に交換してください。
2. 充電中にLEDインジケータが点灯しない場合は、充電ベースが電源およびバッテリー本体に正しく接続されているかご確認ください。
3. 治療のたびに、ペン先を洗浄・滅菌してください。
4. 残ったガッタパーチャは、医療用綿棒で拭き取ってください。

5. 適切に使用すれば、ペンチップは25回以上オートクレーブ滅菌が可能です。オートクレーブ時間は温度によって異なります（121℃で少なくとも20分、132℃/134℃では少なくとも5分間）

保証に関する説明：

メーカーとして、素材および製造工程に起因する製品の欠陥については、1年間の保証期間内である場合に限り、責任を負います。本機器の本体の保証期間は1年間、バッテリーの保証期間は6ヶ月です。無断で第三者が行った操作に起因する損害については、一切の責任を負いかねます！

技術サービス：

1. ハンドルのサイズ：長さ 126mm、直径 19mm
2. 電源電圧：230V/50Hz または 115V/60Hz
3. 動作温度：0℃ ～ +40℃
保管温度：-10℃ ～ +60℃
4. 動作時の湿度：
95%RH未満 保管時の
湿度：95%RH未満
5. 大気圧：動作時 70～
106kPa、保管時 50～106kPa
6. 感電防止：タイプB

記号と定義：

	クラスII機器（アダプター）
	直流
	タイプB機器
	注意！取扱説明書をお読みください
	屋内専用
	CEマーク付き製品
	WEEE
	取扱説明書をご参照ください

連絡先：

kadashika.jp@gmail.com
URL:https://www.kadashika.jp/